

義大醫院人體生物資料庫 組織檢體採集、分裝示範

non-tumor 及 tumor part 盡可能各留下
1cm*1cm*1cm
(若檢體太小也應至少有
3mm*3mm*3mm)



non-tumor



tumor

組織裝入
紅蓋檢體
罐後，封
入夾鏈袋
內
(需標示病
人資料)



組織檢體及參與者同意書送至開刀房控台。
撥院內分機**5805**或
257318通知人體生
物資料庫人員拿取。

如醫師欲將組織檢體**立即冷凍**，
或以**RNAlater**、**OCT**保存，請於
組織檢體取下後即聯絡人體生
物資料庫人員(**分機5805或257318**)
進入開刀房協助收集。